


Réglage du loquet de verrouillage

Vous avez des difficultés à fermer et à ouvrir le loquet de verrouillage de votre Eloflex ? Vous souhaitez le rendre plus facile ou peut-être plus ferme à verrouiller ? En serrant ou en desserrant les deux ressorts à côté du loquet de verrouillage, vous pouvez facilement l'ajuster. Voir l'image ci-dessous.

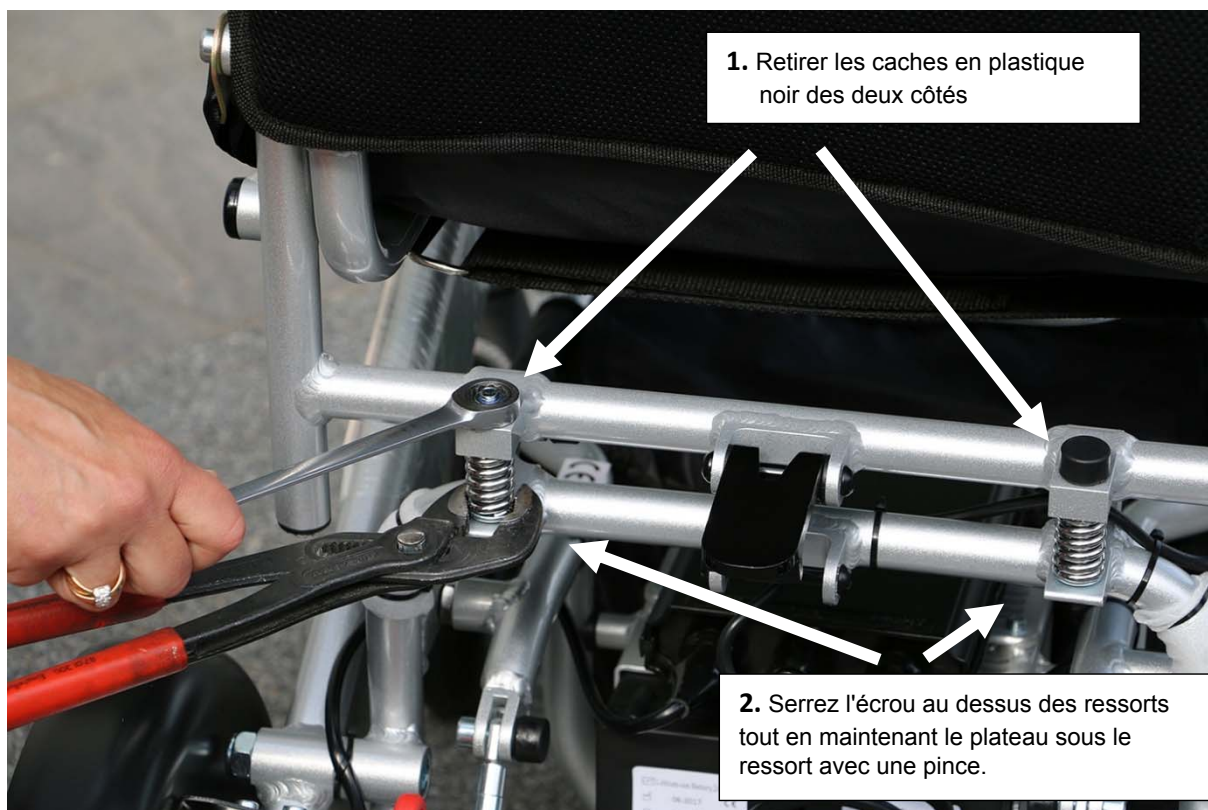

Important :

Il est important que le crochet de verrouillage de votre Eloflex monte et descende lentement. Il doit se déplacer si lentement qu'il puisse se tenir droit tout seul, comme sur l'image ci-contre. Il est important pour que le crochet de verrouillage reste dans sa position verrouillée, même si les ressorts sont comprimés. Pour rendre votre loquet plus lent, il vous suffit de serrer le support à l'aide des deux vis Allen qui maintiennent le loquet en place. Voir l'image à droite.

